


How to Use - 究極にシンプルな操作 -

計測・判定はとても簡単。スマホの電源を ON にすると、あらかじめインストールされている体温検知アプリ「Thermo Detector」を起動します。あとは音声に従い、スマホのカメラに向くことで約 2~4 秒で結果を音声で知らせてくれます。

1. 起動

S61 の電源を入れアプリ起動

アプリを起動すると体温検知が開始できます。エラーの場合は、音声に従って 30 秒程システムの調整をお待ちください。

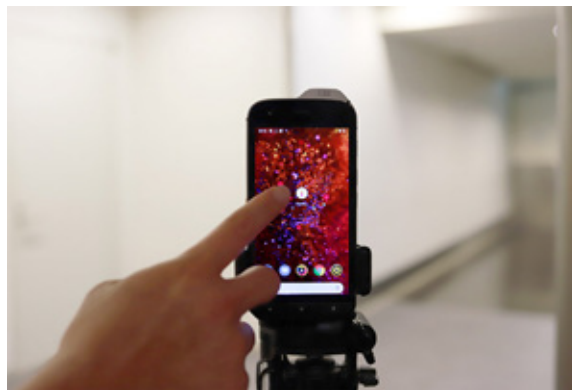

2. 計測

サーマルカメラで体温検知

スマホから約 1.5m 以内の場所で、カメラに向かいできるだけ真正面に立ちます。顔を検知し額の場所を割り出し約 2~4 秒で体温を計測します。



3. 音声結果

判定結果を音声でお知らせ

正常体温の範囲内と判定した場合は「お通りください」、体温が高いと判定された場合は「発熱を検知しました。体温計で体温を測ってください」と音声でお知らせします。

※別モニターでモニタリング可能



スマホならではのフレキシブルな設置方法

スマホを設置するのは、人が通る場所から約 1.5m 以内の場所が最適です。三脚の使用はもちろん、棚などの上にスマホスタンドを置いたり、フレキシブルなスマホホルダーを使ったりと状況に応じた様々な設置方法で対応できます。

カメラ用三脚・スマホスタンド

スマートフォンならではの取り回しの良さから、あらゆるカメラ用三脚やスマートフォン用スタンドが装着できます。

※雲台に装着する場合は別途スマホホルダーが必要となる場合がございます。



充電ケーブルを接続してください

アプリ使用中は、基本的にCAT S61の給電を行いながらご使用ください。



ご利用イメージと適性な距離

約 0.5m ~ 1.5m



次ページの「立ち止まり線」を印刷して、
利用してください。



アプリに関するお問い合わせ

<factory4 サポートページ>

「アプリが起動しない」「アプリがない」等の場合は、お問い合わせ内容をご記入の上、弊社サポートまでご連絡ください。

<https://f4.cosmoway.net/contact/>



